

YOU•DERM®

CIX®

Gel Cicatrici
con Siliclear Complex

You-Derm CIX® Gel Cicatrici è un gel a base di silicone, leggero e autoasciugante, indicato nel trattamento di cicatrici. You-Derm CIX® Gel Cicatrici asciuga rapidamente formando una pellicola gas permeabile e impermeabile all'acqua. You-Derm CIX® Gel Cicatrici aderisce allo strato corneo (lo strato più superficiale della pelle) formando una barriera protettiva che impedisce l'aggressione degli agenti esterni (chimici, fisici e microbici) e ne garantisce l'idratazione.

Di conseguenza si crea un ambiente favorevole che permette di mantenere un adeguato livello di umidità e ossigenazione supportando i normali cicli di sintesi del collagene e migliorando l'aspetto estetico della cicatrice stessa.

I gel di silicone si sono dimostrati efficaci nel trattamento delle cicatrici abnormi di tipo ipertrofico e cheloide. Le Raccomandazioni Cliniche Internazionali del 2002* riportano: "il silicone dovrebbe essere impiegato come primo prodotto di cura nel trattamento iniziale delle cicatrici e nella prevenzione delle cicatrici ipertrofiche e cheloidi:"

You-Derm CIX® Gel Cicatrici è indicato nel trattamento di cicatrici ipertrofiche e cheloidi, recenti e non, in seguito ad interventi chirurgici, traumi, ferite e ustioni.

Istruzioni per l'uso:

Assicurarsi che la zona interessata sia pulita e asciutta.

Applicare un sottile strato di You-Derm CIX® Gel Cicatrici sulla zona interessata e lasciare asciugare.

Per un risultato ottimale, applicare You-Derm CIX® Gel Cicatrici due volte al giorno.

You-Derm CIX® Gel Cicatrici deve rimanere a contatto della pelle per 24 ore una volta asciutto.

You-Derm CIX® Gel Cicatrici può essere abbinato a indumenti compressivi, prodotti solari a protezione totale o cosmetici.

Se You-Derm CIX® Gel Cicatrici non si è asciugato nel giro di 4-5 minuti, significa che è stato applicato in quantità eccessiva.

Rimuovere il prodotto in eccesso e lasciare asciugare.

La durata minima di trattamento è di 60-90 giorni.

Le cicatrici di vecchia data e di grandi dimensioni potrebbero richiedere un trattamento prolungato.

Si raccomanda l'uso continuato del prodotto qualora il miglioramento sia visibile anche durante i primi 90 giorni di trattamento.

Asciugatura:

Il processo di asciugatura di You-Derm CIX® Gel Cicatrici è favorito dalla differenza di temperatura fra il gel e la pelle. Per ridurre i tempi di asciugatura nei climi caldi, conservare You-Derm CIX® Gel Cicatrici in frigorifero. In climi freddi, usare un asciugacapelli a bassa velocità per ridurre i tempi di asciugatura.

Precauzioni d'uso:

Non usare You-Derm CIX® Gel Cicatrici vicino a occhi, naso o bocca. Evitare il contatto diretto con mucose, ustioni di terzo grado e ferite aperte. Non utilizzare You-Derm CIX® Gel Cicatrici in presenza di patologie dermatologiche che alterano l'integrità della pelle.

Solo per uso esterno. In caso di irritazione, interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura compresa tra 5° e 25°C. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione (M).

Il numero del lotto è stampato sul fondo del contenitore.

Ingredienti:

Butano, Pentano, Polisilossani, Biossido di Silicio.

Contenuto:

6g, 15g.



Advanced Bio-Technologies, Inc
1100 Satellite Boulevard Suwanee,
GA 30024, USA

EC REP

Sinclair Pharmaceuticals Limited, Office Village,
Chester Business Park, Chester, CH4 9QZ, UK
Distribuito in Italia da:

A. Menarini IFR srl Via Sette Santi, 3-50131- Italia



*Mustoe TA et al. Plast Reconstructive Surg 2002; 110:560-71



A. MENARINI